

CERTIFICATO DI GARANZIA

La Garanzia del venditore ha la durata di 24 mesi.

La Garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita di particolari inefficienti per difetto di fabbricazione accertato e riconosciuto dal venditore o da chi da esso delegato. La Garanzia decade se l'apparecchiatura è usata in modo non conforme alle presenti condizioni o alle indicazioni del costruttore; se modificata, riparata o smontata, anche in parte, fuori dai laboratori del venditore o appartenenti all'organizzazione commerciale ed assistenziale del costruttore.

DATA VENDITA -----

TIMBRO E FIRMA DEL VENDITORE -----

**NON SOSTITUIRE MAI LA CAPSULA PRIMA DEL TERMINE DEL CICLO
NON RIMUOVERE LA TASTIERA A MEMBRANA**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione di alimentazione: 220-240 V

Frequenza di Rete: 50 Hz

Potenza assorbita: max 15 W

Il Diffusore rispetta le normative europee di sicurezza **CE**

SISTEMA BREVETTATO



www.kontak.it

PROPOL

therapy



PROGRAMMA AMBIENTE

Sanificazione ambientale con la diffusione della frazione volatile della propoli. Riduzione del 71,3% della carica microbica presente nell'aria in soli 3 gg di utilizzo.




PROGRAMMA MASCHERA AEROSOL

Un modo sano, pratico ed efficace di prenderti cura del tuo benessere, semplicemente respirando. Prevenzione 100% naturale.

PROPOL therapy

è dotato di tastiera multifunzione che permette di personalizzare l'utilizzo. Posizionare il diffusore su una superficie piana, inserire la spina e premere il tasto 

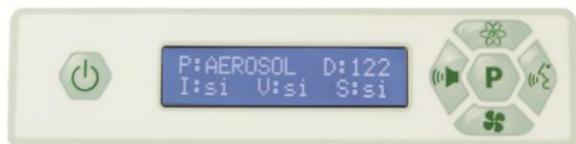

Selezionare la tipologia di programma:

P AMBIENTE

Per ottenere i migliori risultati nella prevenzione delle malattie respiratorie e per una sanificazione ambientale completa, KONTAK consiglia l'utilizzo del diffusore 24 ore su 24. È possibile attivare o disattivare le seguenti funzioni solo nel PROGRAMMA AMBIENTE:



IONIZZATORE

Lo Ionizzatore esalta le proprietà di sanificazione della propoli. Attraverso il processo di ionizzazione, le molecole di propoli, liberate nell'aria, assumono carica elettrica negativa e attraggono particelle volatili di polarità opposta, come batteri, fumo, virus e polveri, sui quali si esercitano le naturali proprietà antisettiche, antibiotiche batteriostatiche della propoli. I microorganismi sono inibiti e non possono svilupparsi; l'aria si libera così delle sostanze nocive e inquinanti, e il nostro apparato respiratorio può godere a pieno dei principi attivi della propoli.

La disattivazione dello Ionizzatore permette l'utilizzo del diffusore anche ai bambini al di sotto dei 3 anni.



VENTOLA

Il diffusore senza l'opzione della ventola garantisce una copertura fino a 30 mq. L'inserimento della ventola permette di raddoppiare il raggio di azione saturando ambienti fino a 60 mq.



SUONO

Un leggero beep sonoro avverte che il ciclo della capsula è terminato. All'avvicinarsi del termine, si può disattivare il suono per non arrecare disturbo durante la notte.

P MASCHERA AEROSOL

Dopo aver selezionato programma MASCHERA AEROSOL, attendere il tempo necessario per il raggiungimento della temperatura ideale di fusione della propoli (5 min. ca). Si consigliano sedute non inferiori a 15 minuti. Il kit in dotazione comprende 1 mascherina pediatrica, 1 mascherina adulti e 1 tubo di raccordo.

La capsula è monouso e ha una durata di 122 ore ca. Sul display è indicato il conteggio a ritroso delle ore di utilizzo (D). Il termine del ciclo della capsula è segnalato da un bip sonoro e dalla seguente indicazione sul display:

SOSTITUIRE CAPSULA RESETTARE CICLO

Al termine della durata della capsula è **NECESSARIO RESETTARE** il sistema operativo. Il procedimento del RESET è il seguente:

1. Accendere il diffusore
2. Premere il tasto  per circa 15 secondi (si sentirà prima un bip continuo e poi un bip alternato).
3. Sostituire la capsula esaurita con una nuova capsula per iniziare un nuovo ciclo.

A ciclo ultimato, all'interno della capsula, sarà visibile un residuo di propoli depauperata, ormai priva di principi attivi.



Le informazioni sono disponibili in 5 lingue: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese e Spagnolo

PROPOL therapy

utilizza solo ed esclusivamente capsule KONTAK